

Scheda tecnica

1. Produttore: **HUBEI KANGNING PROTECTIVE PRODUCTS CO., LTD.**
2. Nome Prodotto: Mascherina chirurgica, Tipo I, cod. 00031.CE, taglia SMALL, monouso, tre strati, non sterile.
3. Immagini prodotto (taglia SMALL):



4. Composizione mascherina: mascherina composta da 3 strati di tessuto non tessuto sovrapposti, quello centrale ha la funzione di filtro bi-direzionale (Melt Blown Filter).
5. Musare: cm 14,5 x cm 9,5.
6. Materiali:

1° strato	Spun Bond PP (non-woven)
2° strato	Melt Blown PP 25 GR/M2 (parte filtrante)
3° strato	Spun Bond PP (non-woven)

6. Peso : 2,9-3,2 grammi/pezzo
7. Confezione : 50 mascherine in busta sigillata trasparente.
8. Certificazione : CE e registrazione presso Ministero della Salute n. BD/RDM: 2000756 (v. pagine 1 e 2).
9. Caratteristiche dispositivo : DM - Classe I - Tipo I, Mascherina facciale protettiva monouso, conforme alla normativa in vigore con marcatura CE e registrazione presso il Ministero della Salute.
10. Sistema di tenuta al viso: Doppio elastico per le orecchie – filo di metallo per il naso.
11. Modalità e consigli di utilizzo:


Modalità di utilizzo:

1. Aprire la mascherina con il filo metallico per il naso verso l'alto, il lato chiaro della mascherina verso il volto, il lato azzurro verso l'esterno.
2. Apporre l'elastico di tenuta attorno alle orecchie e sagomare il filo metallico premendolo sul naso.
3. Regolare la dimensione della maschera aprendola verso il basso e verso l'alto per coprire completamente il naso ed il mento.

Consigli di utilizzo:

1. Indossate la mascherina secondo la descrizione delle immagini 1, 2 e 3.

2. Se la mascherina risulta danneggiata, si consiglia di sostituirla immediatamente.
 3. E' vietato indossare questo prodotto prima di andare a dormire e durante il sonno.
 4. Dopo aver indossato la mascherina evitare di avvicinarsi a qualsiasi fonte di calore e/o fiamma, che potrebbero causare ustioni o deformazioni del materiale.
 6. Il prodotto è monouso, si prega di non riutilizzarlo per più volte.
 7. Per lo smaltimento si prega di ripiegare la mascherina dall'interno verso l'esterno e legarla con gli elastici delle orecchie prima di gettarla nella spazzatura (indifferenziato).
 8. Non è consigliato l'utilizzo in ambiente ad alta contaminazione microbica.
12. Durata della mascherina : mascherina monouso da usarsi per massimo 2-4 ore continuative (la mascherina comunque non è più funzionante dal momento in cui diventa umida).

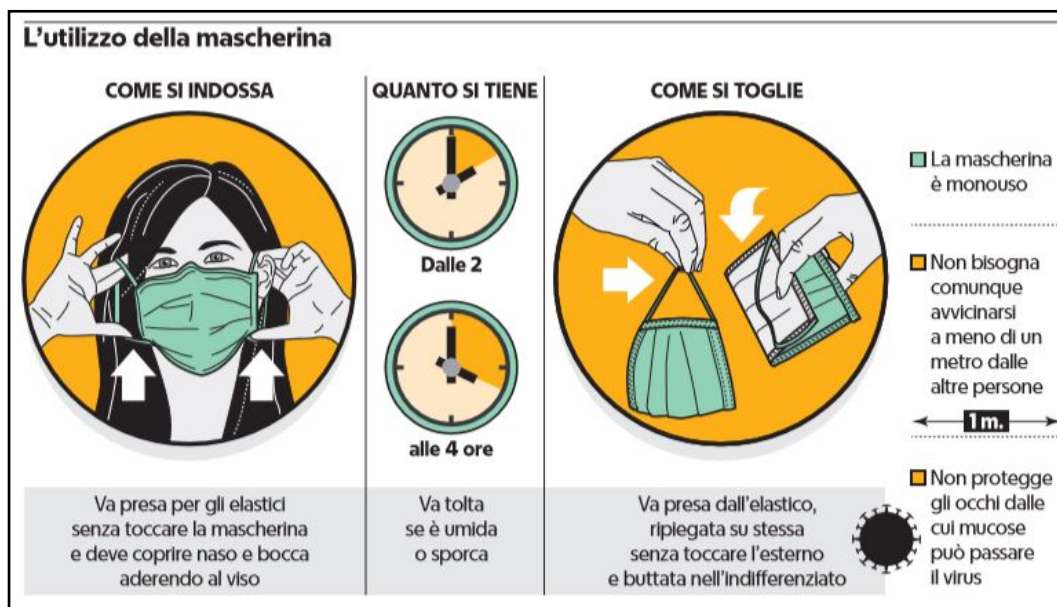

13. Smaltimento : (v. sopra, consigli di utilizzo, n. 7).

MARCATURA CE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEL PRODOTTO:

Il presente prodotto è munito all'origine di certificazione di conformità alla Direttiva 93/42/CE e di registrazione presso il Ministero della Salute al n. BD/RDM: 2000756.

Il prodotto non necessita per tali motivi di alcuna deroga alla commercializzazione ex art. 15 D.L. n. 18/2020, né di alcuna comunicazione e/o autocertificazione inviata all'Istituto Superiore di Sanità o all'INAIL, essendone attestata e provata la conformità alle normative europee e nazionali.